

Bedienungsanleitung Reanimationspuppen

1. Überziehen der TWINSKIN Maske

Das Benutzen der Maske ist ein Muss.

Sie dient zur Sicherheit der reanimierenden Personen und wird einfach über die Grundmaske drübergezogen.

2. Wechseln der Lunge

Nach der Beatmungssequenz wird die Lunge gewechselt, um sie für die folgenden Klassen wieder einsatzbereit zu machen.

Folgende Schritte sind notwendig:



Die Oberkörperabdeckung wird entfernt (Knöpfe seitlich an Flanke) und zur Seite gelegt.
Die benutzte Lunge kommt zum Vorschein.



Die Grundmaske wird am Ohr vorsichtig abgezogen und zur Seite gelegt.



Nun wird die alte Lunge am Klebepunkt gelöst und das Mundstück herausgenommen.

Hierzu bitte die beiden Seiten gleichzeitig eindrücken und ziehen.



Die Lunge ist mit einem Plastikröhrchen über das untere Stück drüberschoben (sitzt sehr fest).

Dies wird entfernt und die alte Lunge entsorgt.



Die neue Lunge wird mit dem Plastikring am Mundstück befestigt, Achtung: Der Klebepunkt muss auf der unteren Seite sein, wenn die Lunge mit dem Mundstück vor einem liegt, siehe Bild.



Nun die Lunge durch den Hals fädeln (am besten in überstreckter Position) und auch hier muss der Klebepunkt auf der unteren Seite liegen.



Bitte das Mundstück richtig einsetzen, bis es klickt.



Den Klebepunkt auf der markierten Stelle aufkleben.

Anschließend werden die Grundmaske und die Brustabdeckung wieder aufgelegt und seitlich mit dem Knubbel festgesteckt.



Hier muss darauf geachtet werden, dass die Grundmaske genau aufsitzt, sonst gibt es Probleme bei der Beatmung.

3. Desinfektion der Brustabdeckung

Abschließend mit einem Papiertuch die Brustabdeckung desinfizieren und nachtrocknen.

Viel Erfolg bei der Reanimation!